

Oxivir Excel Foam CE

Detergente e disinfettante pronto all'uso per dispositivi medici non invasivi - Dispositivo Medico Classe IIa

Descrizione

Oxivir Excel Foam è un detergente disinfettante altamente concentrato con un ampio spettro di efficacia e basso tempo di contatto. Si basa sulla tecnologia brevettata a base di Perossido di Idrogeno Accelerato (Accelerated Hydrogen Peroxide), Oxivir Excel Foam può essere usato su superfici dure e non porose.

Caratteristiche principali

- Azione virucida completa in soli 30 secondi
- Battericida, virucida, lieviticida
- Pulizia superiore grazie ad un sistema tensioattivo ad alte prestazioni
- Semplice da utilizzare
- Senza profumo
- Non richiede risciacquo
- Più sicuro per l'ambiente, ma anche per gli utenti, poiché i principi attivi si scompongono in acqua e ossigeno
- Privo di alchilfenoletossilati (APE), etossilati di nonilfenolo (NPE) e composti organici volatili (COV)

Benefici

- La sua ampia efficacia offre i massimi livelli di protezione igienica. Ampiamente testato secondo le norme europee, è risultato efficace nei confronti di molteplici agenti patogeni che destano preoccupazione: ha un'azione virucida completa che include Poliovirus, Adenovirus e Norovirus murino considerati efficaci contro tutti i virus incapsulati come: HIV, HBV, HCV, influenza, Vaccinia e Coronavirus
- Prestazioni di pulizia superiori e agisce 10 volte più velocemente rispetto ai tradizionali prodotti disinfettanti
- Eccellenti proprietà detergenti, efficace anche per la rimozione del calcare, elimina la necessità di procedere con una pulizia preliminare
- Sicuro per gli utenti senza necessità di utilizzare DPI. Nessuna classificazione di rischio
- La formulazione AHP è delicata su superfici e ne prolungano la vita
- Adatto per l'uso in aree ad alto rischio in ambito sanitario incluse sale operatorie, unità di terapia intensiva, unità neonatali e camere dei degenti


Dosaggi consigliati

Prodotto pronto all'uso, utilizzare tal quale.

Applicazione

Applicazione Spray:

1. Rimuovere lo sporco grossolano
2. Applicare sulla superficie nebulizzando su un panno oppure direttamente sulla superficie
3. Lasciare agire il tempo necessario per garantire la disinfezione secondo quanto riportato nella sezione relativa ai dati microbiologici
4. Passare con un panno per asciugare o lasciare asciugare all'aria
5. Non è necessario risciacquare

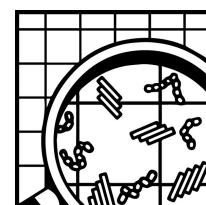



Oxivir Excel Foam CE

Caratteristiche tecniche

Aspetto fisico:	Liquido chiaro
Odore:	Specifico del prodotto
pH (in uso):	~ 2
Peso specifico (g/cm ³ ; 20°C):	≈ 1.00

I dati sopra riportati sono valori tipici di produzione e non costituiscono specifica.

Precauzioni per l'utilizzo e lo stoccaggio

Tutte le informazioni relative alla manipolazione e allo stoccaggio del prodotto sono riportate nella Scheda di Sicurezza; sds.diversey.com. Per esclusivo uso professionale.

Mantenere il prodotto chiuso nel contenitore originale ed evitare temperature di stoccaggio estreme. Solo per utenti professionisti / specialisti.

Compatibilità prodotto

Non miscelare con altro prodotti. Non utilizzare acqua tiepida. Non utilizzare su superfici sensibili agli acidi, Prima dell'uso, verificare la compatibilità dei materiali in un punto poco visibile. Oxivir Excel Foam è adatto all'uso sulle più comuni superfici.

Dati microbiologici

L'efficacia di Oxivir Excel Foam è stata comprovata dai più recenti test internazionali:

Attività	Test EN (condizioni di sporco)	Tempo di contatto
Battericida	EN13727	30 sec
Battericida	EN1276	1 min
Lieviticida	EN16615	1 min
Virucida	EN14476	30 sec

Informazioni ambientali

I tensioattivi utilizzati nel prodotto sono biodegradabili in accordo con le direttive EC 648/2004 e successive modifiche.

Conforme alle specifiche tecniche di base del DM nr 51 del 29.01.2021 sia in ambito civile che sanitario.

Approvazioni

Oxivir Excel CE ha ottenuto la certificazione come dispositivo medico classe IIa, per dispositivi medici non invasivi.

www.diversey.com

© 2021 Diversey, Inc. Tutti i diritti riservati. 14/09/2021 it-IT (K00401)