

Suma Med Super LpH

Vaskemiddel for (invasivt og ikke-invasivt) medisinsk utstyr.

Produktbeskrivelse

Suma Med Super LpH er et konsentrert alkalisk flytende vaskemiddel beregnet til rengjøring av medisinsk utstyr som kirurgiske instrumenter, personlige hjelpemidler, bekken og vaskefat. Har utmerket smussfjerningsevne under alle vannforhold.

Produktegenskaper

Suma Med Super LpH er et alkalisk flytende vaskemiddel som er egnet for bruk i en rekke vaskedesinfeksjonsmaskiner og oppvaskmaskiner. Produktet er spesielt utviklet for vask av medisinske instrumenter, anesthesiutstyr og sugeflasker i vask- og desinfeksjonsmaskiner. Det er også utmerket til rengjøring av vaskeskåler, nyreskåler og bærbart utstyr i skylle- og desinfeksjonsmaskiner. Produktet er også egnet for maskinell oppvask. Det inneholder en blanding av alkalie og kalkhindrende midler, som gir utmerket smussfjerning og kalkhindring under alle vannforhold.

Produktfordeler

- Løser effektivt smuss og tørket blod
- Høy konsentrasjon gir større økonomisk bruk
- Forhindrer avleiring på maskinen og på bekken/vaskefat


Bruksanvisning

Suma Med Super LpH påføres ved hjelp av automatisk doseringsutstyr. Sett sugeslangen inn i vaskemiddelbeholderen, så vil riktig dosering utføres. Tørk medisinsk utstyr før bruk. I tillegg må medisinsk utstyr steriliseres ytterligere hvis det er invasivt. Ingen spesielle krav til hansker under normale bruksforhold. Vernebriller er normalt ikke nødvendig. Det anbefales imidlertid å bruke dem i tilfeller hvor det kan oppstå sprut ved håndtering av produktet.

Dosering*

Brukes i en konsentrasjon på 1-3 ml/l ved en temperatur på 60-70 °C. Den faktiske doseringen bestemmes ut fra lokale forhold.

*Denne doseringen er basert på optimale forhold. Anbefalingene kan variere, så ta kontakt med din Diversey-representant for veiledning.

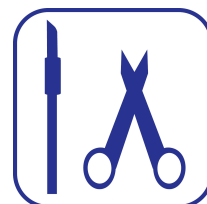

 **Diversey Europe
Operations B.V.**
De Corridor 4,
3621 ZB Breukelen,
The Netherlands.
www.solenis.com



Suma Med Super LpH

Tekniske data

Utseende:	Klar, lysegul væske
Lukt:	Ingen lukt/luktfri
pH-verdi (konsentrert):	≥ 11.5
pH-verdi (løsning):	≈ 11
Relativ tetthet (20 °C):	≈ 1.15

Ovennevnte data er typiske for normal produksjon og bør ikke betraktes som spesifikasjoner.

Informasjon om sikker håndtering og oppbevaring

Fullstendig veiledning om håndtering og avhending av dette produktet finnes i et separat sikkerhetsdatablad; sds.diversey.com. Håndter i henhold til god industriell hygiene og sikkerhetspraksis. Holdes borte fra mat, drikke og dyrefôr. Ikke bland med andre produkter med mindre Diversey anbefaler det. Oppbevares i lukket originalemballasje. Unngå ekstreme temperaturer. Produktet er ikke beregnet for gjenbruk. Kun til profesjonelt bruk.

Advarsel

Oppbevares på temperaturer mellom 0 og 40 °C. Ved alvorlige hendelser i forbindelse med bruk av Suma Med Super LpH, skal brukeren rapportere dette til det lokale Diversey-kontoret og til den kompetente myndigheten i medlemsstaten der brukeren og/eller pasienten er bosatt. Ikke gjenbruk. Produktet er ikke beregnet for bruk på menneskelig hud. Ikke bruk på medisinsk utstyr laget av polyetylentereftalat (PET). Uten riktig sterilisering er produktet ikke beregnet for bruk på invasivt medisinsk utstyr som trenger inn i vev eller blodomløpet, eller kommer i direkte kontakt med intakte slimhinner. Anvendelser utover de angitte anbefales ikke. Vask hendene før pauser og ved slutten av arbeidsdagen. Vask ansikt, hender og eksponert hud grundig etter håndtering. Ta av deg all forurenset bekledning umiddelbart. Bruk personlig verneutstyr etter behov. Brukes kun med tilstrekkelig ventilasjon.

Kan forårsake misfarging av sensitive materialer ved overdosering eller for høy temperatur (se doseringsanbefalinger).

Personlig verneutstyr

Anbefalte sikkerhetstiltak ved håndtering av ufortynnet produkt: Dekke til aktiviteter som påfylling og overføring av produkt til påføringsutstyr, kolber eller bøtter.

	Personlig verneutstyr
Øye-/ansiktsbeskyttelse	Vernebriller er normalt ikke påkrevd. Det anbefales imidlertid å bruke vernebriller i tilfeller hvor det kan oppstå sprut ved håndtering av produktet (EN 166).

Anbefalte sikkerhetstiltak ved håndtering av det fortynnede produktet: Ingen spesielle krav under normale bruksforhold.

Avfallshåndtering

Konsentrert innhold eller forurenset emballasje skal kastes av en sertifisert personale eller i henhold til stedets tillatelse. Det frarådes å kaste avfall i kloakken. Det rensede emballasjematerialet er egnet for energigjenvinning eller resirkulering i samsvar med lokal lovgivning.

Europeisk avfallskatalog: 20 01 29* - vaskemidler som inneholder farlige stoffer.

Tom emballasje anbefaling: Avhend i henhold til nasjonale eller lokale forskrifter.

Egnede rengjøringsmidler: Vann, om nødvendig med et rengjøringsmiddel.

Suma Med Super LpH

Tilgjengelige emballasjestørrelser

Varenummer	Varenavn	Plattform
9294647	SUMA MED SUPER LPH 200L W3255	

www.diversey.com

© 2025 Diversey, Inc. All Rights Reserved. Rev.19/12/2025 nb-NO (P01151)