

Oxivir Excel Acti

Konsentrert rengjørings- og desinfeksjonsmiddel for ikke-porøse harde overflater og ikke-invasivt medisinske utstyr

Produktbeskrivelse

Oxivir Excel Acti, med AHP-teknologi, er et ideelt valg for effektiv rengjøring og desinfeksjon i ett steg.


En løsning for alle bruksområder, utviklet for profesjonelt bruk på harde, ikke-porøse flater og overflater på ikke-invasivt medisinsk utstyr (kun for profesjonelt bruk).

Produktegenskaper

- Ideelt produkt for alle bruksområder, inkludert helsesektoren, ikke-helserelaterte områder og næringsmiddelindustrien
- Fullstendig virusdrepende
- Rask virkning mot et bredt spekter av virus, bakterier og gjær
- Overlegen rengjøring med høytytende overflateaktivt system
- Uten parfyme
- Ingen skylling nødvendig
- Aktiv substans brytes ned til vann og oksygen
- BPR-godkjent biocid
- Sertifisert medisinsk utstyr

Produktfordeler

- Oxivir Excel Acti har bredspektret effekt mot bakterier, gjær og virus ved kort kontakttid, og gir høyeste nivå av desinfeksjon mot flere relevante patogener.
- BPR-godkjent og omfattende testet i henhold til europeiske standarder
- Oxivir Excel Acti har full virucid effekt, inkludert dokumentert effekt mot ikke-kapslede virus som polio, adeno og murint norovirus, samt kapslede virus som koronavirus, vacciniavirus, HIV, HBV, HCV og influensa.
- Oxivir Excel Acti har overlegen rengjøringsevne takket være kraftige overflateaktive stoffer, noe som gjør det ikke bare til et utmerket desinfeksjonsmiddel, men også til et effektivt rengjøringsmiddel.
- AHP-formuleringen er skånsom mot overflater, forlenger utstyrets levetid og etterlater ingen harde rester på overflaten
- Oxivir Excel Acti er egnet for daglig rengjøring og desinfeksjon av harde overflater, samt for bruk i områder med høy berøringsfrekvens i detaljhandel, utdanning, serveringssteder, langtidspleie og andre sektorer, samt høyrisikoområder på sykehus som operasjonsstuer, intensivavdelinger, nyfødtintensivavdelinger og pasientrom

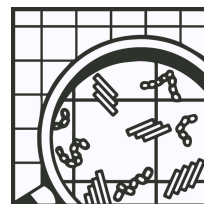

BPR
APPROVED

 **Diversey Europe**
Operations B.V.
De Corridor 4,
3621 ZB Breukelen,
The Netherlands.
www.solenis.com



Oxivir Excel Acti

Bruksanvisning (...fortsettelse)

Produktet må kun brukes med kaldt vann, bruk ved romtemperatur.

For pakninger med manuelt fortynningssystem: For å unngå skumdannelse, fyll en beholder eller en skumsprayflaske tre fjerdedeler full med kaldt vann. Tilsett riktig mengde av det konsentrerte produktet for å oppnå den fortynningen som er angitt i tabellen nedenfor i henhold til beholderstørrelsen som brukes. Fyll forsiktig opp med resten av vannet. Fjern grove urenheter.

Påfør det fortynnede produktet ved å:

- Sprøyt med en skumtrigger direkte på overflaten eller på en ren klut. Tørk eventuelt av for å spre løsningen.
- Dyp moppen ned i beholderen. Klem ut overflødig løsning. Rengjør og desinfiser gulvet med den våte moppen.
- Bløtlegger kluten eller svampen i oppløsningen. Fordel væsken på overflaten. Sørg for å fukte overflaten helt.
- Tekk til dypebadet med et lokk etter at du har plassert gjenstandene i desinfeksjonsløsningen (gjelder ikke medisinsk utstyr), og sørg for at gjenstandene som skal desinfiseres, er helt nedsenket i løsningen.

La virke i 5 minutter. La det lufttørke. Ingen skylling er nødvendig etter desinfeksjon.

For pakninger med (halv)automatisk fortynningssystem med 2 innstillinger: Velg riktig innstilling på doseringsutstyret. Fyll en beholder med det fortynnede produktet og følg instruksjonene nedenfor.

Tilberedning av våtservietter: Tilbered 1,5 liter fortynning ved å tilsette 75 ml Oxivir Excel Acti til 1,425 liter kaldt vann. Påfør fortynningen i bøtta. Lukk bøtten. Sørg for at våtservietten er ordentlig impregnert med oppløsningen. Åpne lokket og ta en enkelt våtserviett (bruk kun våtservietter). Lukk lokket.

For helsevesenet:

Påføringsmetode	Spesifisert område	Konsentrasjon	Kontaktid	Påføringsmengde*
Mopping med fuktet mopp (inkl. bruk på medisinsk utstyr)	n.a.	bakterier, gjær, virus: 4.5%	5 min	11 - 40 mL/m ²
Spredning med en fuktet klut (inkl. bruk på medisinsk utstyr)	n.a.			11 - 40 mL/m ²
Spraying med skum-trigger (valgfritt: tørk for å spre løsningen)	toaletter og bad			11 mL/m ²
	sykehus og legekontorer			
	laboratorier			
	renrom			
Dyping eller bløtlegging i løsningen (ikke for medisinsk utstyr)	n.a.			opptil 3 L
Dusj med klargjorte våtservietter	n.a.	bakterier, gjær, virus: 5%	5 min	1.5 m ²

*Påføringsmengde: Mængden af væske, der skal til for at gøre overfladen fuldstændig våd i kontaktperioden.

Oxivir Excel Acti

Bruksanvisning (...fortsettelse)

For ikke-helsevesenet:

Påføringsmetode	Spesifisert område	Konsentrasjon	Kontakttid	Påføringsmengde*
Mopping med fuktet mopp	n.a.	bakterier 1,5%, gjær 3,75%, virus 2%	5 min	11 - 40 mL/m ²
Spredning med en fuktet klut	n.a.			11 - 40 mL/m ²
Spraying med skum-trigger (valgfritt: tørk for å spre løsningen)	toaletter og bad			11 mL/m ²
	kosmetikk-/farmasøytiske produksjonsanlegg			
	laboratorier			
	renrom			
Dyping eller bløtlegging i løsningen	n.a.			opptil 3 L

*Påføringsmengde: Mængden af væske, der skal til for at gøre overfladen fuldstændig våd i kontaktperioden.

For områder i kontakt med mat:

Påføringsmetode	Spesifisert område	Konsentrasjon	Kontakttid	Påføringsmengde*
Mopping med fuktet mopp	n.a.	bakterier, gjær, virus: 3.75%	5 min	11 - 40 mL/m ²
Spredning med en fuktet klut	n.a.			11 - 40 mL/m ²
Spraying med skum-trigger (valgfritt: tørk for å spre løsningen)	kjøkken og kantine			11 mL/m ²
	næringsmiddelindustrien			
	disk i en butikk/supermarked			
Dyping eller bløtlegging i løsningen	n.a.			opptil 3 L
Dusj med klargjorte våtservietter	n.a.	bakterier, gjær, virus: 5.0%	5 min	1.5m ²

*Påføringsmengde: Mængden af væske, der skal til for at gøre overfladen fuldstændig våd i kontaktperioden.

Tekniske data

Utseende:	Klar, lysegul væske
Lukt:	Nøytral
pH-verdi (konsentrert):	0.55
pH-verdi (løsning):	<≈ 2
Relativ tetthet (20 °C):	≈ 1.07
Holdbarhet:	2 år etter produksjon (Utløpsdato: se emballasjen)
Virkestoff:	7,2 % hydrogenperoksid

Ovennevnte data er typiske for normal produksjon og bør ikke betraktes som spesifikasjoner.

Oxivir Excel Acti

Informasjon om sikker håndtering og oppbevaring

Fullstendig veiledning om håndtering og avhending av dette produktet finnes i et separat sikkerhetsdatablad; sds.diversey.com. Håndter i henhold til god industriell hygiene og sikkerhetspraksis. Holdes borte fra mat, drikke og dyrefôr. Ikke bland med andre produkter med mindre Diversey anbefaler det. Oppbevares i lukket originalemballasje. Unngå ekstreme temperaturer. Produktet er ikke beregnet for gjenbruk. Kun til profesjonelt bruk.

Advarsel

Oppbevares innenfor følgende temperaturområde: 6 °C - 30 °C. Ikke bruk dersom emballasjen er skadet. Beskytt mot direkte sollys. Fare: inneholder alkylbensensulfonsyre (dodecylbensensulfonsyre), hydrogenperoksid, metansulfonsyre, alkylalkohol etoksylat ((C9-C11) alkylalkohol etoksylat). Kan være etsende for metaller. Forårsaker alvorlige hudforbrenninger og øyeskader. Skadelig for vannlevende organismer med langvarige effekter.

Personlig verneutstyr

Fullstendig veiledning om personlig verneutstyr for dette produktet finnes i et separat sikkerhetsdatablad: sds.diversey.com. **Ved håndtering av «konsentrerte» produkter:** Bruk nødvendig personlig verneutstyr og sørg for tilstrekkelig ventilasjon.

- **Øye-/ansiktsbeskyttelse:** Vernebriller eller beskyttelsesbriller (EN 16321). Bruk av hel ansiktsmaske eller annen full ansiktsbeskyttelse anbefales sterkt ved håndtering av åpne beholdere eller hvis det er risiko for sprut.
- **Håndbeskyttelse:** Kjemikaliebestandige vernehansker (EN 374). Kontroller instruksjonene om permeabilitet og gjennombruddstid fra hanskeleverandøren. Ta hensyn til lokale forhold som risiko for sprut, kutt, kontakttid og temperatur. Anbefalte hansker for langvarig kontakt: Materiale: butylgummi Gjennomtrengningstid: ≥ 480 min Materialtykkelse: $\geq 0,7$ mm. Anbefalte hansker for beskyttelse mot sprut: Materiale: nitrilgummi Gjennomtrengningstid: ≥ 30 min Materialtykkelse: $\geq 0,4$ mm.
- **Kroppsbeskyttelse:** Bruk kjemikaliebestandig bekledning og støvler dersom direkte hudeksponering og/eller sprut kan forekomme (EN 14605).
- **Åndedrettsvern:** Hvis eksponering for væskepartikler eller sprut ikke kan unngås, bruk halvmaske (EN 140) eller helmaske (EN 136) med partikkelfilter P2 (EN 143). Ved utilstrekkelig ventilasjon: helmaske (EN 136) med filtertype ABEK-P2 (EN 14387). Ta hensyn til lokale bruksforhold.

Ved håndtering av fortynnede produkter: Sørg for god generell ventilasjon. Sørg for at skumutstyret ikke genererer partikler som kan inhaleres. **PPE:** Bruk personlig verneutstyr etter behov. **Håndbeskyttelse:** Skyll og tørk hendene etter bruk. Ved langvarig kontakt kan hudbeskyttelse være nødvendig.

Avfallshåndtering

Fullstendig veiledning om avhending av dette produktet finnes i et separat sikkerhetsdatablad: sds.diversey.com.

Avfall fra rester/ubrukte produkter: Konsentrert innhold eller forurenset emballasje skal kastes av en sertifisert håndterer eller i henhold til lokale tillatelser. Det frarådes å slippe avfall i kloakken. Renset emballasje er egnet for energigjenvinning eller resirkulering i samsvar med gjeldende lovgivning. **Anbefaling for tom emballasje:** Kast i henhold til nasjonale eller lokale forskrifter. Egnede rengjøringsmidler: Vann, eventuelt med rengjøringsmiddel. **Viktig:** Den originale beholderen må oppbevares så lenge produktet er i bruk.

Oxivir Excel Acti

Produktkompatibilitet

Oxivir Excel Acti er beregnet for bruk som desinfeksjonsmiddel på harde overflater, inkludert harde overflater på ikke-invasivt medisinsk utstyr. Under anbefalte bruksforhold er Oxivir Excel Acti egnet for overflater som rustfritt stål, krom, vinyl, nylonstoff, laminerte overflater, glass, gummi samt hard og fleksibel plast (polypropylen, polyuretan, polyetylen, PVC-akryl, glassfiber og polykarbonat). Bruk utover de angitte områdene anbefales ikke. Oxivir Excel Acti er ikke beregnet for bruk på invasivt medisinsk utstyr. **Ikke bland med andre produkter. Ikke beregnet for porøse eller syrefølsomme overflater.**

Mikrobiologiske data

Bruksområde: PT2 Healthcare under skitne forhold

Anvendelsesområde	Krav	EN Norm	Organisasjoner	Kontakttid	Fortynning
Mopping* Spraying og valgfri avtørking* Skumming* Bløtlegging/dypping * inkl. bruk på medisinsk utstyr	Bakteriedrepende	EN 13727 EN 13697 EN 16615	E. coli, E. hirae, P. aeruginosa, S. aureus	5 min	4.5%
	Yeasticidal	EN 13624 EN 13697 EN 16615	C. albicans		
	Virucidal	EN 14476	Adenovirus, Murine, norovirus, Poliovirus		
Tørking (ved bruk av tørkeserviettøtte)	Bakteriedrepende	EN 13727 EN 16615	E. hirae, P. aeruginosa, S. aureus	5 min	5.0%
	Yeasticidal	EN 13624 EN 16615	C. albicans		
	Virucidal	EN 14476	Adenovirus, Murine, norovirus, Poliovirus		

Oxivir Excel Acti

Mikrobiologiske data (...fortsettelse)

Bruksområde: PT2 Ikke-helsetjenester under skitne forhold

Anvendelsesområde	Krav	EN Norm	Organisasjoner	Kontakttid	Fortynning
Mopping Spraying & valgfri avtørking Bløtlegging/dypping Skumming	Bakteriedrepande	EN 1276 EN 13697 EN 16615	E. coli, E. hirae, P. aeruginosa, S. aureus	5 min	1.5%
	Yeasticidal	EN 1650 EN 13697	C. albicans		3.75%
	Virucidal	EN 14476	Adenovirus, Murine norovirus, Poliovirus		2%
Tørking (ved bruk av tørkeserviettøtte)	Bakteriedrepande	EN 13727 EN 16615	E. hirae P. aeruginosa S. aureus	5min	5%
	Yeasticidal	EN 13624 EN 16615	C. albicans		
	Virucidal	EN 14476	Adenovirus, Murine, norovirus, Poliovirus		

Bruksområde: PT4 Overflater i kontakt med næringsmidler under skitne forhold

Anvendelsesområde	Krav	EN Norm	Organisasjoner	Kontakttid	Fortynning
Mopping Spraying og valgfri avtørking Bløtlegging/dypping Skumming	Bakteriedrepande	EN 1276 EN 13697	E. coli, E. hirae, P. aeruginosa, S. aureus	5 min	3.75%
	Yeasticidal	EN 1650 EN 13697	C. albicans		
	Virucidal	EN 14476	Adenovirus, Murine, norovirus, Poliovirus		
Tørking (ved bruk av tørkeserviettøtte)	Bakteriedrepande	EN 1276 EN 16615	E. coli, E. hirae, P. aeruginosa, S. aureus	5 min	5%
	Yeasticidal	EN 1650 EN 16615	C. albicans		
	Virucidal	EN 14476	Adenovirus, Murine, norovirus, Poliovirus		

Oxivir Excel Acti

Miljøinformasjon

De overflateaktive stoffene i dette produktet er biologisk nedbrytbare i samsvar med kravene i EUs vaskemiddelforordning, EC 648/2004.

Godkjenninger

- Biocid: BPR EU-0032483-0001 1-1
- Notifisert organ for medisinsk utstyr: CE0044

Tilgjengelige emballasjestørrelser

Varenummer	Varenavn	Plattform
60050954	OXIVIR EXCEL ACTI 2X5L W4954	Manuelt dosert

www.diversey.com

© 2025 Diversey, Inc. All Rights Reserved. Rev.15/12/2025 nb-NO (K02981)