



Diversey™

# Oxivir Sporicide™ Wipe CE

Bredspektriga väteperoxidbaserade Rengörings- & Desinfektionsdukar för icke invasiva medicinska instrument och för ej porösa hårda ytor.

## Produktbeskrivning

Diversey Care Oxivir Sporicide™ Wipe CE är en bruksfärdig, kombinerad rengörings- och desinfektionsduk som är effektiv mot *Clostridium difficile* och *Bacillus subtilis*. Baserad på Diversey Cares patenterade Accelerated Hydrogen Peroxide (AHP) formulering kan Oxivir Sporicide Wipe användas på icke invasiva medicinska instrument och hårda, ej porösa ytor.

## Produktegenskaper

- Effektiv mot *Clostridium difficile* på 1 minut\*
- Tuberkulocid, Baktericid, Spor-, virus- och svampavdödande på 1 minut\*
- Användarvänlig och säker att använda på olika material jämfört med andra sporavdödande produkter
- Enkel att använda, ingen förberedelse eller tvätt nödvändig
- Effektiv rengöring
- Parfymfri
- Produkten bryts ned till vatten och syre – Inga aktiva rester på rengjord yta
- Innehåller inte klor eller alkohol

## Produktfördelar

- Utmärkt gensvar vid utbrott av *Clostridium Difficile*
- Produkten avdödar med ett brett spektrum alla andra klasser av patogener och ger den högsta möjliga säkerheten för patienter och personal
- Kort kontakttid håller ytan fuktig under verkningstiden vilket säkerställer desinficerande effekt
- Ingen eftersköljning nödvändig
- Enkel och lättanvänd lösning som utesluter misstag med utspädning.
- Ingen risk för korskontaminering, tack vare förpreparerade engångsdukar
- Utmärkt att använda för alla högriskområden inom sjukvård såsom Operationssalar, Intensivvårds- Neonantalintensivvårdsavdelning och Patientrum

## Bruksanvisning


### Applikation

1. Avlägsna lös smuts.
2. Öppna förpackningen med dukar, dra ut en duk och stäng locket.
3. Torka av ytan och säkerställ att hela ytan är fuktad, låt ytan lufttorka.
4. Säkerställ att ytan förblir fuktad under kontakttiden.
5. Tag en ny duk när den inte längre fuktar ytan, om duken är synbart smutsig eller när en ny patientnära yta ska rengöras och desinficeras.

**Viktigt:** Kombinera inte med andra produkter. Använd inte produkten på ytor känsliga för vatten eller syra.

\* Vid användning som slutlig desinficering efter tidigare rengöring.

CE

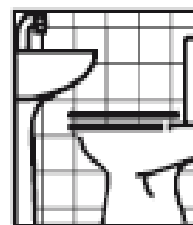

## Teknisk information

Utseende:	Duk av polypropylen
Relativ densitet [20° C]:	1.03265
pH brukslösning:	2.7 ± 0.3
Hållbarhet:	2 år i öppnad behållare
Doft:	Neutral

Ovanstående data är typiska värden och gäller inte som specifikation.

## Skyddsföreskrifter och lagring

Fullständig information om användning och hantering av denna produkt lämnas på separat säkerhetsdatablad. Förvaras i sluten originalförpackning. Undvik extrema temperaturer. Reagerar med oxiderbara ämnen.

## Att beakta

Diversey Oxivir Sporicide Wipe är lämplig att använda på alla tänkbara ytor förutsatt att man följer rekommenderade anvisningar.

## Miljöinformation

Tensiderna i produkten är lätt nedbrytbara enligt tvätt- och rengöringsmedelsförordningen, EC 648/2004.

## Mikrobiologisk information

Oxivir Sporicide är godkänd enligt: EN13727, EN13624, EN13697, EN14476, EN13704, EN14348, EN16615

Krav	Kontaktid/förhållande		
	EN test	Smutsig yta	Ren yta
<i>Bateriocid</i>	EN13727	30 sek	
	EN13697	1 min	
	EN16615	1 min	
<i>Jästavdödande</i>	EN13624	1 min	
	EN13697	1 min	
	EN16615	1 min	
<i>Svampavdödande</i>	EN13624	6 min	
	EN13697	5 min	
<i>Virusavdödande</i>	EN14476	1 min	
<i>Sporavdödande (C. difficile)</i>	EN13704	3 min	1 min
<i>Sporavdödande (B. subtilis)</i>		30 min	15 min
<i>Tuberkulocida</i>	EN14348	15 min	
<i>Mykobaktericida</i>	EN14348	5 min	

## Förpackningsstorlekar

Artikelnummer	Förpackningsstorlek	Förpackningstyp
100941883	12x80 st dukar	Plastförpackning