



Diversey™

Oxivir Sporicide

Desinfiioiva puhdistusaine

Kuvaus tuotteesta

Oxivir Sporicide on käyttövalmis, yksivaiheinen, pesevä desinfektioaine, joka tehoaa mm. Clostridium difficileen ja Bacillus subtiliseen sekä näiden itiöihin. Tuotteen vaahtomainen rakenne pysyy pyyhittävällä pinnalla nestettä paremmin, vaikuttaen desinfektion onnistumiseen sekä helpottaen työskentelyä. Oxivir Sporiciden teho perustuu patentoituun AHP-tekniikkaan (Accelerated Hydrogen Peroxide). Tuote soveltuu vettäsietäville kovalle pinnoille sekä ei-invasiivisille lääkinällisille laitteille (CEIIa).

Ominaisuudet

- Tehoo Clostridium difficileen 1 minuutissa*.
- Tehoo bakteereihin, viruksiin, hiivoihin ja itiöihin.
- Vaahtomainen rakenne.
- Hyvä pesuteho.
- Aktiiviatteet hajoavat vedeksi ja hapeksi, kerrostumaton.

* EN-testien mukaan

Edut

- Erinomainen enteriittien torjuntaan.
- Laajakirjoinen teho kaikkia taudinaiheuttajia vastaan.
- Lyhyt vaikutusaika.
- Ei tarvitse huuhdella pinnoilta.
- Ei aiheuta hengitysteiden ärsytystä.
- Soveltuu käytettäväksi terveydenhuollon korkean riskin kohteissa mukaan lukien teho-osastot, potilas- ja eristysuoneet. Vaahtomainen rakenne helpottaa työskentelyä.

Käyttöohje


Poista irtolika. Pyyhi pinta vaahtoon kostutetulla siivouspyyhkeellä tai annostele tuotetta suoraan pinnalle ja pyyhi.

Tärkeää: Käytä suojakäsineitä. Älä sekoita muiden kemikaalien kanssa. Älä käytä pinnoille, jotka ovat herkkiä vedelle tai hapoille.

Annostus

Käyttövalmis

**Tämä annostus on optimaalisten olosuhteiden mukainen, suositukset voivat vaihdella. Ota yhteyttä Diversey-edustajaasi saadaksesi lisäohjeita.*

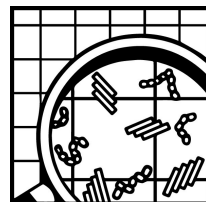

© A.I.S.E

The logo for Diversey, featuring the brand name in a white serif font inside a dark blue oval shape with a stylized leaf icon to the right.

DiverseyTM

Oxivir Sporicide

Tekniset tiedot

pH-arvo (laimentamaton): ~ 3
pH-arvo (käyttöliuos): ~ 3
Suhteellinen tiheys (g/cm³; 20°C): ≈ 1.03

Yllä olevat tiedot ovat tyypillisiä normaalituotannossa. Niitä ei voi käyttää ohjeavoina.

Käyttöturvallisuus ja varastointi

Tuotteen turvalliseen käsittelymiseen ja hävittämiseen liittyvät tiedot löytyvät käyttöturvallisuustiedotteesta sds.diversey.com. Vain ammattikäyttöön. Säilytys alkuperäisessä pakkauksessa suurilta lämpötilojen vaihteluilta suojattuna.

Säilyvyys: Käyttöönottettuna / avamattomana 2 vuotta valmistuspäivästä.

Huomioitavaa: Käytä suojakäsineitä! Ei saa käyttää marmoripinnoille. Älä sekoita toisten tuotteiden kanssa.

Mikrobiologiset tiedot

Teho viruksiin, bakteereihin, itiöihin ja hiivoihin on osoitettu EU-normien mukaisesti. Tuotteella on CE IIA -sertifiointi. Pyydä tarvittaessa testitulokset edustajaltamme.

www.diversey.com

© 2021 Diversey, Inc. All Rights Reserved. 01/12/2021 fi-FI (K00028)