



Suma Med Super LpH

Pesuaine (invasiivisille ja ei-invasiivisille) lääkinnällisille laitteille.

Kuvaus

Suma Med Super LpH on tiivistetty vahvasti emäksinen nestemäinen CE-merkitty pesuaine, joka on tarkoitettu lääkinnällisten laitteiden puhdistukseen ja joka poistaa lian erinomaisesti kaikissa vesiolosuhteissa.

Tärkeimmät ominaisuudet

Suma Med Super LpH on emäksinen nestemäinen pesuaine, joka soveltuu käytettäväksi monenlaisissa sairaalavälineiden pesu- ja desinfiointikoneissa. Tuote on erityisesti suunniteltu lääketieteellisten instrumenttien, anestesiavälineiden ja imupullojen pesuun pesu- ja desinfiointikoneissa. Se soveltuu erinomaisesti myös pesuautojen, munuaisautojen ja porttien puhdistukseen huuhtelu- ja desinfiointikoneissa. Tuote soveltuu myös koneelliseen astioiden pesuun. Se sisältää emäksisten ja kalkinestoaineiden sekoitusta, joka poistaa erinomaisesti likaa ja estää kalkin muodostumista kaikissa vesiolosuhteissa.

Edut

- Erinomainen pesutulos myös kuivuneelle verelle
- Korkean konsentraation ansiosta käyttö on taloudellisempaa
- Estää kalkkisaostumien muodostumista koneisiin
- Helppokäyttöisyys kätevässä pienessä pakkauksessa

Käyttöohjeet

Suma Med Super LpH käytetään automaattisella annostelulaitteistolla. Aseta imuputki pesuainesäiliöön, jolloin oikea annostelu tapahtuu. Kuivaa lääkinnällinen laite ennen käyttöä. Lisäksi lääkinnälliset laitteet on steriloitava edelleen, jos ne ovat invasiivisia. Ei erityisiä käsinevaatimuksia normaaleissa käyttöolosuhteissa. Suojalaseja ei normaalisti tarvita. Niiden käyttöä suositellaan kuitenkin niissä tapauksissa, joissa tuotetta käsiteltäessä voi esiintyä roiskeita.

Annostus*

Käytetään pitoisuutena 1-3 ml/l 60-70 °C:n lämpötilassa. Todellinen annostelu määräytyy paikallisten olosuhteiden mukaan.

**Tämä annostus on optimaalisten olosuhteiden mukainen, suositukset voivat vaihdella, kysy ohjeita Diversey-edustajaltasi.*

Käyttö

Suma Med Super LpH on tarkoitettu tiivistetyksi nestemäiseksi pesuaineeksi, joka on erityisesti suunniteltu poistamaan erinomaisesti likaa lääkinnällisten laitteiden puhdistuksessa kaikissa vesiolosuhteissa. Käytetään pesuaineena invasiivisten ja ei-invasiivisten lääkinnällisten laitteiden puhdistukseen pesukoneissa. Vain ammattikäyttöön.


Tekniset tiedot

Ulkonäkö:	Kirkas vaaleankeltainen neste
Haju:	Ei hajua / hajuton
pH-arvo (tiiviste):	>= 11.5
pH-arvo (käyttöliuos):	≈ 11
Suhteellinen tiheys (20°C):	≈ 1.15

Yllä olevat tiedot ovat tyypillisiä tavanomaiselle tuotannolle, eikä niitä pidä pitää spesifikaationa.



Diversey Europe
Operations B.V.
Maarssebroeksedijk 2,
3542 DN Utrecht,
The Netherlands

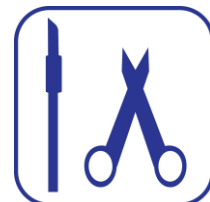



Suma Med Super LpH

Turvallisen käsittelyn ja varastoinnin tiedot

Täydelliset ohjeet tämän tuotteen käsittelystä ja hävittämisestä on esitetty erillisessä käyttöturvallisuustiedotteessa; sds.diversey.com. Käsiteltävä noudattaen hyviä teollisuushygienia- ja turvallisuuskäytäntöjä. Säilytettävä erillään elintarvikkeista, juomista ja eläinten rehusta. Ei saa sekoittaa muiden tuotteiden kanssa. Säilytettävä suljetuissa alkuperäispakkauksissa, suojattuna äärimmäisiltä lämpötiloilta. Tuotetta ei ole tarkoitettu uudelleenkäytettäväksi. Vain ammattimaisille käyttäjille/asiantuntijoille.

Varoitus

Säilytä 0-40 °C:n lämpötilassa. Jos Suma Med Super LpH:n käyttöön liittyy vakavia vaaratilanteita, käyttäjän on ilmoitettava niistä paikalliselle Diverseyn toimistolle ja sen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, johon käyttäjä ja/tai potilas on sijoittautunut. Älä käytä uudelleen. Tuotetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi ihmisen iholla. Ei saa käyttää polyeteenitereftalaatista (PET) valmistetuissa lääkinnällisissä laitteissa. Ilman asianmukaista sterilointia tuotetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi invasiivisissa lääkinnällisissä laitteissa, jotka läpäisevät kudoksen tai tunkeutuvat verenkiertoon, eikä se joudu suoraan kosketuksiin ehjien limakalvojen kanssa. Muita kuin mainittuja käyttötarkoituksia ei suositella. Pese kädet ennen taukoja ja työpäivän päätteeksi. Pese kasvot, kädet ja kaikki altistunut iho huolellisesti käsittelyn jälkeen. Riisu välittömästi kaikki saastuneet vaatteet. Käytettävä henkilökohtaisia suojavarusteita tarpeen mukaan. Käytettävä vain riittävässä ilmanvaihdossa.

Saattaa aiheuttaa herkkien materiaalien värimuutoksia, jos tuotetta yliannostellaan tai jos lämpötila on liian korkea (katso annostussuosituksen).

Henkilökohtaiset suojavarusteet

Suosittelut turvatoimenpiteet laimentamattoman tuotteen käsittelyssä: Peittävät toimet, kuten tuotteen täyttäminen ja siirtäminen levityslaitteisiin, pulloihin tai ämpäriin.

	Henkilökohtaiset suojavarusteet
Silmien/kasvojen suojaus	Suojalaseja ei yleensä tarvita. Niiden käyttöä suositellaan kuitenkin silloin, kun tuotetta käsiteltäessä voi esiintyä roiskeita (EN 166).

Suosittelut turvallisuustoimenpiteet laimennetun tuotteen käsittelyssä: Ei erityisvaatimuksia normaaleissa käyttöolosuhteissa.

Hävittäminen

Väkevöity sisältö tai saastunut pakkaus on hävitettävä sertifioidun käsittelijän toimesta tai käyttöpaikan luvan mukaisesti. Jätteiden päästämistä viemäriin ei suositella. Puhdistettu pakkausmateriaali soveltuu energian talteenottoon tai kierrätykseen paikallisen lainsäädännön mukaisesti. **Euroopan jäteluettelo**: 20 01 29* - vaarallisia aineita sisältävät pesuaineet. **Tyhjät pakkaukset Suositus**: Hävitettävä noudattaen kansallisia tai paikallisia määräyksiä. **Sopivat puhdistusaineet**: Vesi, tarvittaessa puhdistusaineen kanssa.

www.diversey.com

© 2025 Diversey, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Rev.31/03/2025 fi (P01151)