



Diversey™

# Oxivir Plus

## Bredspektret rengørings- og desinfektionsmiddel til ikke-invasivt medicinsk udstyr og ikke-porøse hårde overflader.

### Beskrivelse

Diversey Oxivir Plus er et høj-koncentreret flydende rengøringsmiddel til rengøring og desinfektion af alle hårde overflader, der tåler vand, samt visse boligtekstiler.

Kan anvendes på ikke-invasivt medicinsk udstyr, og hårde ikke-porøse overflader.

### Egenskaber

Baktericidal, Virucidal, Fungicidal, Sporicidal, og Gærdræbende.

Desinficerer på blot 1 minut.

Effektivt rengøringsmiddel.

Uden parfume.

Baseret på patenteret accelereret hydrogenperoxid

### Fordele

Fremragende rengøringsevne.

AHP-formuleringen er skånsom på overflader, hvilket forlænger udstyrets levetid.

Rengør og desinficerer i en arbejdsgang undtagen Norovirus\*, hvilket sparer tid.

Testet iht. europæiske normer som bredspektret desinfektion overfor bakterier, vira, gær og svampe.

Fremragende rengøringsresultater, stribefri optørring, minimerer kalkaflejring.

Kan anvendes til hårde overflader, der tåler vand samt visse tekstiloverflader.

God sikkerhedsprofil for brugeren.

Aktivstoffet nedbrydes til ilt og vand.

Baseret på patenteret accelereret hydrogenperoxid (AHP) teknologi.

Velegnet til alle typer anvendelsesområder fx i høj-risikoområder i sundhedssektoren.

### Brugsanvisning

#### Anvendelse:

En arbejdsgang ved bakterier, svampe og vira, undtagen Norovirus\*

Sprayrengøring og desinfektion:

Fjern alt løs snavs

Sprøjt på overfladen

Tør af med en ren klud forvædet med Oxivir Plus

Sprøjt på igen og lad Oxivir Plus virke den ønskede tid i forhold til anvendelsen. Tør derefter af.

Rengøring og desinfektion med spandopløsning:

Fjern alt løs snavs

Påfør Oxivir Plus fortyndingen med en moppe eller en klud

Efterlad overfladen våd i den ønskede tid i forhold til anvendelsen.

Lad gulvområder lufttørre, berøringsoverflader tørres af med en klud.

Kontaktetid i forhold til anvendelse:

Baktericidal: 5 minutter

Fungicidal: 15 minutter

Virucidal\*: 5 minutter




Tuberculocidal: 30 minutter

Anvendelse:

To arbejds gange ved \*Norovirus.

Sprayrengøring og desinfektion:

Rengør overfladen.

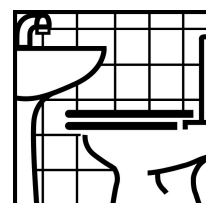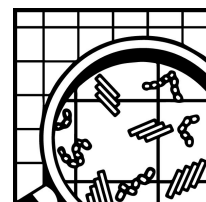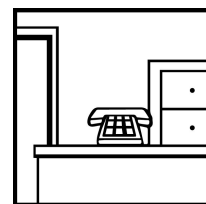

© A.I.S.E

Sprøjt Oxivir Plus fortyndingen på overfladen

Behandl overfladen med ren klud forvædet med Oxivir Plus fortynding

Sprøjt på igen og lad Oxivir Plus fortyndingen virke i mindst 2 minutter. Tør derefter af.

Rengøring og desinfektion med spandopløsning:

Rengør overfladen

Påfør Oxivir Plus fortyndingen med en moppe eller en klud

Efterlad overfladen våd i mindst 2 minutter.

Lad gulvområder lufttørre, berøringsoverflader tørres af med en klud

Vigtigt!

Brug ikke varmt vand. Bland ikke med andre produkter. Anvend ikke på vand- eller syrefølsomme overflader.

### **Dosering**

3.5% for at efterleve desinfektionskrav (35ml til 1l brugsopløsning).

*\*Denne dosering er i henhold til optimale betingelser, anbefalinger kan variere, kontakt venligst din Diversey konsulent for anvisninger.*

The logo for Diversey, featuring the brand name in a white serif font inside a blue oval shape with a stylized leaf icon to the right.

Diversey™

# Oxivir Plus

## Tekniske data

pH-værdi (ufortyndet): < 2  
pH-værdi (brugskoncentration): ~ 2  
Relativ vægtfylde (g/cm<sup>3</sup>; 20°C): ≈ 1.03

*Ovenstående data er typisk for en normal produktion og bør derfor ikke anses som specifikationer.*

## Sikker håndtering og opbevaring

Udførlig vejledning i håndtering og bortskaffelse af produktet findes i separat sikkerhedsdatablad på [sds.diverseym.com](https://sds.diverseym.com). Opbevares i lukket originalemballage. Undgå ekstreme temperaturer.

Kun til professionelt brug/specialister.

## Mikrobiologiske data

Effektivitet	EN test	Anvendelsesområde	Mikroorganismer	Rene forhold			Beskidte forhold		
				Kontaktid	Brugsopløsning	ml/1L vand	Kontaktid	Brugsopløsning	ml/1L vand
Bakteriedræbende	EN 1276						30 sek.	3,5%	

## Emballagestørrelser

Varenummer	Varenavn	Platform
100827422	DI Oxivir Plus 2x5L W3588	Manuel dosering

[www.diverseym.com](https://www.diverseym.com)

© 2022 Diversey, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. 18/04/2022 da-DK (K00232)